

Anwendungshinweise



- ✓ nur Cenaman Überleitsystem PDA-C (EC20027) verwenden
- ✓ Überleitsystem immer von links (Nahrung) nach rechts (Patient) in den Pumpkanal einlegen
- ✓ Tropfkammer muss mind. bis zur Hälfte mit Nahrung gefüllt sein (manuelles Vorfüllen)
- ✓ die Tür...
 - ...muss mit einem hörbaren „Klick“ einrasten
 - ...darf nicht mit Gewalt geschlossen oder geöffnet werden
 - ...muss regelmäßig hinsichtlich ihrer Funktionsweise überprüft werden: leichtgängig? springt richtig auf? Mechanismus verschmutzt?
- ✓ vor neuer Nahrungsgabe Überleitsystem um eine Türbreite (ca. 10 cm) in Richtung Patient verschieben, da im Pumpkanal das Überleitsystem deformiert wird und so ungewollt Alarme auslösen könnte
- ✓ das Überleitgerät spätestens nach 24 Stunden wechseln
- ✓ bei mobilem Betrieb Pumpe ohne Charger mitnehmen

Maßnahmen bei **ERROR** Meldung

- ~~✗~~ Pumpe aus- und wiedereinschalten
- ~~✗~~ Prüfung, ob richtiges System verwendetw
- ~~✗~~ Überleitsystem in Fließrichtung verschieben
- ~~✗~~ Prüfung, ob Pumpkanal verunreinigt



Anwendungshinweise



HYGIENE

Ein sauberes Pumpgehäuse und ein sauberer Pumpkanal sind wichtig für eine fehlerfreie Funktion der CenaMAT plus Pumpe!

Bitte beachten Sie dabei unsere Pflegehinweise:



- ✓ vor Reinigung bitte den Netzstecker ziehen
- ✓ Reinigung mit einem leicht feuchten, mit Spülmittel getränkten Tuch
- ✓ Desinfektion als Wischdesinfektion mit Mitteln auf Alkoholbasis
- ✓ nach Reinigung und Desinfektion vor erneuter Inbetriebnahme 20 Minuten warten
- ✓ ist der Pumpkanal nass oder verschmutzt, diesen mit einem Tuch oder Wattestäbchen reinigen und trocknen
- ✓ Pumpe darf nicht in Flüssigkeit getaucht oder sterilisiert werden



W-ER9 0412

easycare
Research