

# Rucksack für CenaMAT plus enterale Ernährungspumpe

## Lieferumfang

Der Rucksack enthält folgende Komponenten:

- Kunststoffrahmen zur Befestigung von Nahrungsbeutel und Ernährungspumpe
- kleines Klettverschlussband zum Aufhängen des Nahrungsbeutels
- großes Klettverschlussband zur Fixierung des Nahrungsbeutels
- Schraube zur sicheren Fixierung der Ernährungspumpe am Kunststoffrahmen integriert

## BEFESTIGUNG DES NAHRUNGSBEUTELS




Zum einfacheren Handling entnehmen Sie bitte den Kunststoffrahmen aus dem Rucksack.



Führen Sie zunächst die beiliegenden Klettverschlussbänder durch die dafür vorgesehenen Öffnungen:

- das kleine Klettverschlussband durch die Öffnung am oberen Ende des Kunststoffrahmens
- das große Klettverschlussband rechts und links durch die mittleren Öffnungen des Kunststoffrahmens

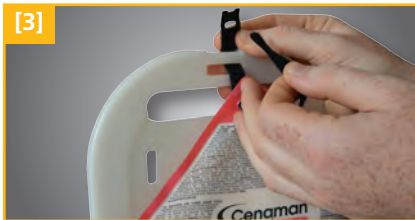

Führen Sie das kleine Klettverschlussband durch die Aufhängevorrichtung des Beutels und verschließen Sie dieses mit der Lasche am oberen Ende. Ziehen Sie das Klettverschlussband fest.



Fixieren Sie nun den Nahrungsbeutel, indem Sie das große Klettverschlussband rechts und links um den Beutel herum führen. Verschließen Sie den Klettverschluss.

### HINWEIS:

Auch zur Verwendung mit 1.000 ml Beuteln und der Cenaman Leerflasche geeignet.



### BEFESTIGUNG DER PUMPE AM KUNSTSTOFFFRAHMEN

Am Boden des Kunststoffrahmens befindet sich eine Schraube, am Boden der Ernährungspumpe ein Gewinde - verschrauben Sie diese bis die Pumpe auf dem Kunststoffrahmen fixiert ist.

#### ACHTUNG:

Verwenden Sie niemals eine andere Schraube, da sonst die Mechanik der Ernährungspumpe beeinträchtigt werden könnte.



### BEFESTIGUNG DES ÜBERLEITSYSTEMS

Schließen Sie das Überleitsystem wie gewohnt am Nahrungsbeutel an. Die Rollenklemme sollte dabei immer geschlossen sein. Füllen Sie dann die komplette Trompfkammer manuell. Anschließend legen Sie den Schlauch des Überleitsystems von links nach rechts (mit der Flußrichtung) in den Pumpenkanal ein und schließen die Pumpentür.



### EINLEGEN DES ÜBERLEITSYSTEMS

#### ACHTUNG:

Stellen Sie sicher, dass sich die Rollenklemme auf der rechten Seite des Pumpenkanals befindet, da sonst das Überleitsystem leicht abknicken könnte.



### RUCKSACK ZUM EINSATZ BEREIT

Platzieren Sie nun den mit Nahrung und Ernährungspumpe adaptierten Kunststoffrahmen wieder im Rucksack. Mit Hilfe des zweiteiligen Reißverschlusses können Sie das Überleitsystem individuell positionieren.

**easycare**  
Research