

HidraWear, le système de soin des plaies sans colle pour les plaies difficiles à soigner




L'acné inversée (ou hidradénite suppurée), une maladie chronique de la peau, se manifeste par des plaies qui affectent fortement la qualité de vie des patientes et patients atteints.

L'acné inversée (AI) est une maladie inflammatoire chronique de la peau entraînant des lésions douloureuses et récurrentes, situées en particulier dans les aisselles, l'aîne, la région génitale et anale ainsi que sous les seins. Elles nécessitent des soins réguliers et affectent considérablement la qualité de vie de ces patientes et patients, dont 90 % nécessitent un soin régulier des plaies. Tant le soin des plaies que celui de la peau jouent un rôle crucial dans la prise en charge de l'AI.

Causes des plaies difficiles à soigner :

- Mouvements des articulations
- Pilosité
- Chaleur et humidité
- Plis de la peau
- Forme et contours du corps

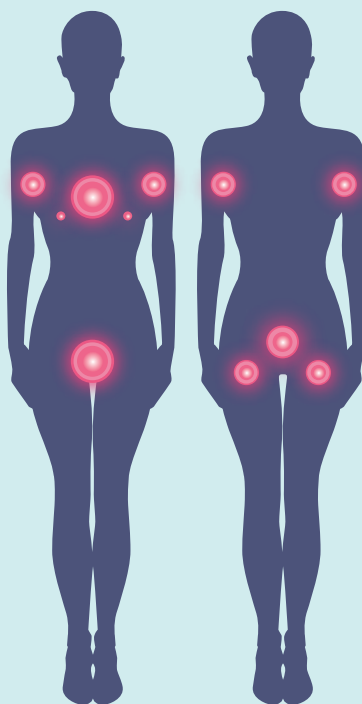

Caractéristiques des plaies causées par l'AI



Lésions enflammées, surtout dans les aisselles, l'aîne et les régions génitales et anales.



Abcès d'évacuation et fistules récurrents. Grandes quantités d'exsudat incommode.





Fortes douleurs. L'intensité de la douleur est corrélée avec le degré de détérioration des tissus.



Soins chronophages de la plaie au quotidien. . Les plus grandes douleurs surviennent lors du changement des pansements adhésifs. ¹

Inconvénients des pansements traditionnels :

- les douleurs causées lors du changement
- le décollement de la peau et les déchirures
- les pansements adhésifs ne sont pas adaptés aux plaies de l'AI
- l'intolérance dans les zones touchées en raison de la pilosité, de l'humidité ou des mouvements auxquels la plaie est soumise
- les pansements traditionnels non adhésifs sont volumineux et inconfortables, ils limitent les mouvements et les activités quotidiennes
- la gaze et les pansements peuvent adhérer au lit de la plaie et causer des douleurs lors du retrait
- les fuites fréquentes
- le risque élevé de défaillance du produit en raison de la localisation qui rend la plaie difficile à soigner

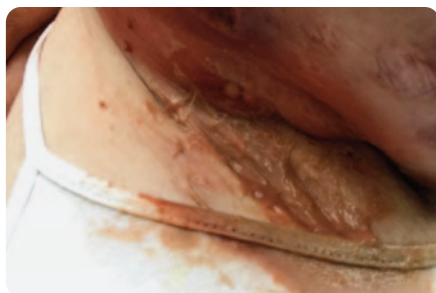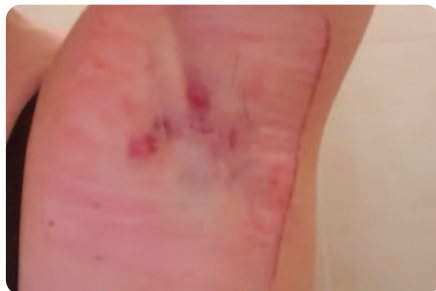

78 % des patients atteints d'AI voient leur qualité de vie fortement diminuée.

98 %

des patients ressentent des douleurs
lors du changement des pansements
adhésifs ²

85 %

des patients ont subi des lésions
cutanées dues à la colle ²

300

minutes par mois en moyenne
pour le soin des plaies ²

93 %

des patients ont déjà eu des
problèmes de fuites ou des
pansements qui se détachent

Recommandations de l'American Academy of Dermatology en 2023³

- Maintenir le pansement en place à l'aide de matériel et de méthodes qui n'entraînent pas de traumatismes
- Privilégier une technique atraumatique afin d'éviter la douleur et l'inconfort lors du retrait du pansement
- Ne pas utiliser de gaze tissée, puisqu'elle tend à adhérer au lit de la plaie, ce qui implique des douleurs lors du changement de pansement.



HidraWear :

le système de soin des plaies sans colle

Développé pour l'acné inversée, HidraWear est le premier système de soin des plaies sans colle qui permette aux patientes et aux patients atteints de plaies chroniques et de plaies difficiles à soigner d'en prendre soin eux-mêmes. La technologie brevetée SecureLock™ garantit que les pansements HidraWear restent fermement en place, sans colle qui altère la peau, ce qui rend le changement de pansement rapide et indolore.

- ✓ Élimine le risque de lésions cutanées liées aux adhésifs médicaux (MARSI)
- ✓ Pas de pansements adhésifs ou de sparadraps à base de silicone ou d'acrylate qui abîment la peau
- ✓ Le patient change le pansement lui-même sans difficulté
- ✓ Amélioration cliniquement prouvée de la qualité de vie dermatologique des patients



**Pansements
superabsorbants**



Top pour femme




T-shirt
unisexe



Short
pour homme



Short
pour femme

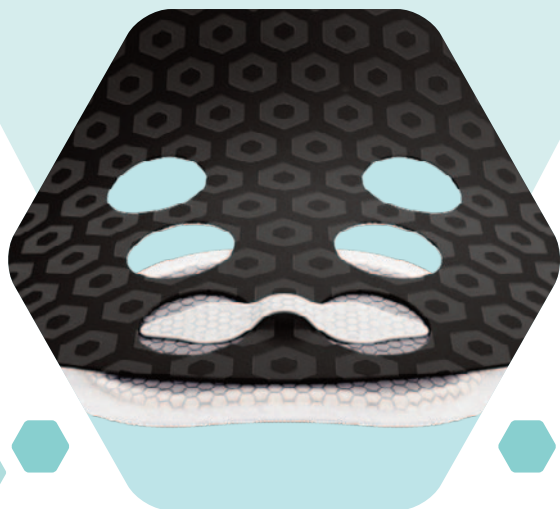

Technologie SecureLock™

Des sous-vêtements fonctionnels combinés à des bandes de fixation en velcro maintiennent le pansement en place, sans colle du tout.



Sous-vêtements fonctionnels



Principales caractéristiques



Sous-vêtements fonctionnels Hidraflex™

1. **SeamSense** – les coutures extérieures protègent la peau sensible et réduisent les irritations.
2. **MicroModal** – super doux, souple et résistant – supporte jusqu'à 100 lavages.
3. **Facile à enfiler** – l'élasthane contenu dans le tissu permet d'enfiler et de retirer ces sous-vêtements facilement.






Aperçu des tailles HydraWear

Afin d'obtenir des résultats cliniques optimums, il est important que les sous-vêtements fonctionnels HydraWear soient bien ajustés. Les tailles des sous-vêtements HydraWear diffèrent des tailles de sous-vêtements standard. Veuillez suivre les instructions de mesure ci-dessous pour garantir un bon ajustement. Si vos mesures se situent entre deux tailles, choisissez la plus petite des deux.

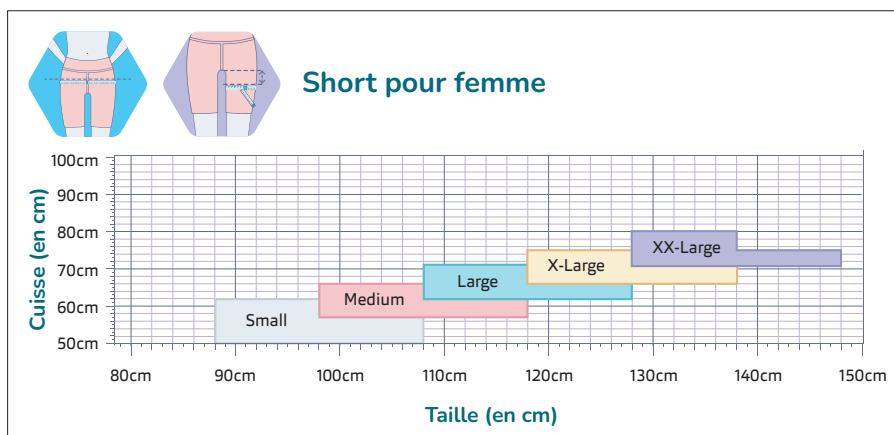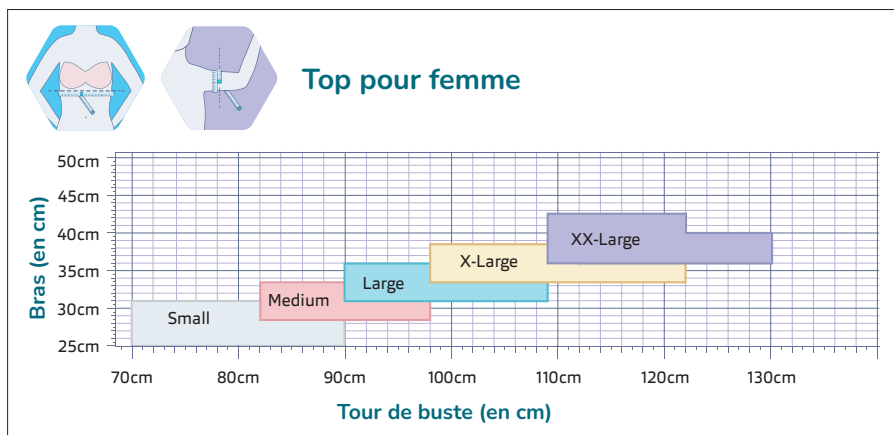




T-shirt unisexe

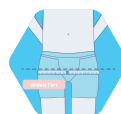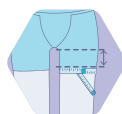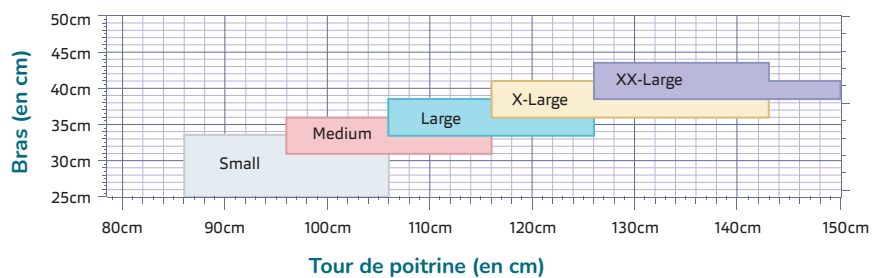

Short pour homme

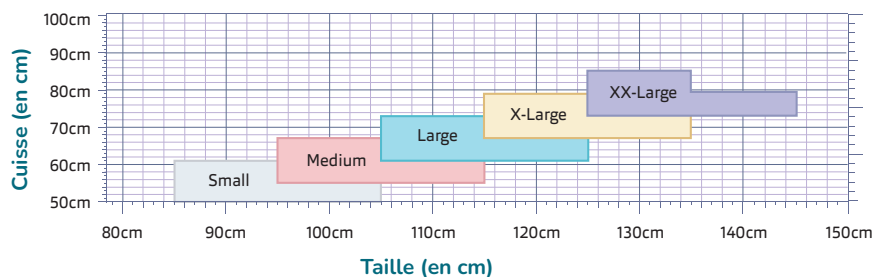

Les pansements HydraWear dotés de la technologie Securelock™ restent en place sans colle, ruban adhésif ni bandage supplémentaire.

Pansement en mousse HydraWear (Foam) pour les plaies faiblement à modérément exsudatives

Le pansement en mousse HydraWear favorise la cicatrisation en milieu humide et absorbe rapidement l'excès de liquide. La couche de mousse épouse le lit de la plaie, assure une cicatrisation et un confort optimums et offre la solution idéale pour le traitement des plaies peu, voire modérément exsudatives.

Principales caractéristiques

1 Couche HydraHex avec technologie SecureLock™

Conçue pour être utilisée avec la bande de fixation SecureLock™. Grâce au motif en nid d'abeille, le pansement s'adapte à la forme du corps et garantit la liberté de mouvement.

2 Couche de protection antifuites

La couche étanche empêche l'exsudat de s'écouler sur les vêtements tout en protégeant la plaie des contaminations extérieures.

3 Couche de mousse douce, rembourrée

Idéale pour les plaies peu exsudatives ou lorsqu'une protection douce de la peau et un rembourrage sont nécessaires..



100 %
sans
adhésif



Technologie SecureLock™

Chaque pansement HydraWear est livré avec une bande de fixation velcro brevetée, qui permet de fixer le pansement sans colle.

Pansement superabsorbant HydraWear (Foam) pour les plaies modérément à fortement exsudatives.



Principales caractéristiques

1 Couche HydraHex avec technologie SecureLock™

Grâce au motif en nid d'abeille, le pansement s'adapte à la forme du corps et garantit la liberté de mouvement.

2 Couche de protection antifuites

La couche étanche empêche l'exsudat de s'écouler sur les vêtements tout en protégeant la plaie des contaminations extérieures.

3 Couche superabsorbante


Sa grande capacité d'absorption empêche l'exsudat ainsi que les bactéries et MMP potentiellement nocives d'atteindre la plaie.

4 Couche en contact avec la peau


Absorption élevée de l'humidité en cas d'exsudat important et soudain.

Qualité leader sur le marché

Fixation des odeurs Séquestration des bactéries

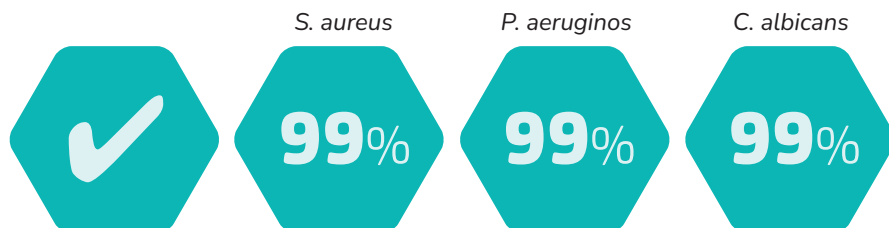

Dépasse le pansement leader du marché pour les principaux critères

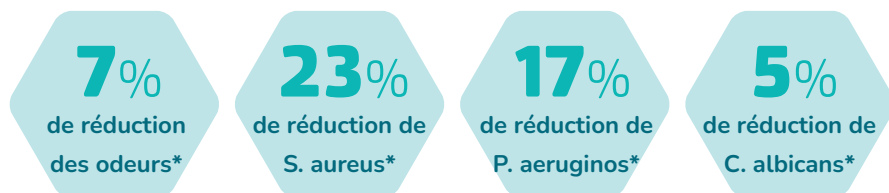

* comparé au leader du marché

Résultats cliniques (synthèse)⁴



Référence

Une étude pilote monobras de 21 jours, en mode ouvert, sur la facilité d'utilisation et l'impact d'un traitement efficace des plaies chez les patients souffrant d'acné inversée.

Qualité de vie (DLQI)

100 % des patientes et patients ont vu leur qualité de vie s'améliorer *

* basé sur le système d'évaluation DLQI dans un essai clinique 2020

100%


Douleurs lors du changement de pansement

93 % des patientes et patients interrogés ont trouvé qu'HidraWear réduisait ou supprimait la douleur lors du changement de pansement (un patient n'avait pas de douleur)

93%

Remarque

L'étude clinique HydraWear a remporté la médaille d'or distinguant la meilleure recherche clinique lors des « Journal of Wound Care Awards 2023 ».

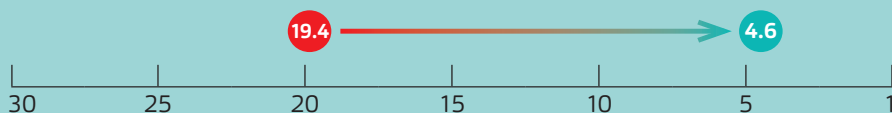


Les patients qui utilisent HydraWear bénéficient d'une amélioration significative de leur qualité de vie dermatologique par rapport aux produits et techniques de pansement traditionnels.




Le soin des plaies HydraWear est moins douloureux pour les patientes et patients, tant lorsqu'ils le portent que quand ils l'enlèvent.

Confort d'utilisation

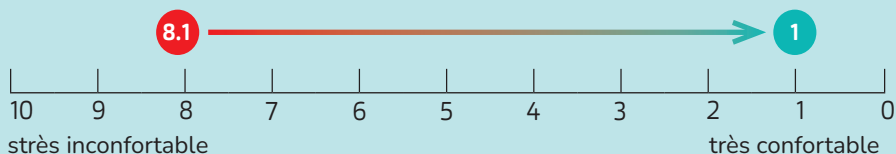


HidraWear est beaucoup plus confortable.

Application du soin de la plaie

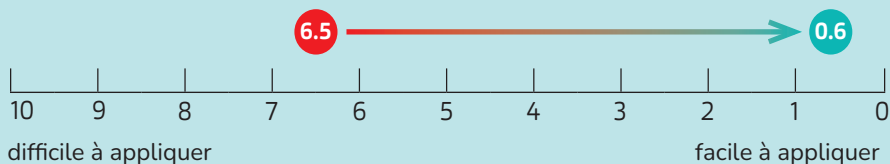


Le traitement des plaies avec HidraWear est nettement plus simple.

Temps requis

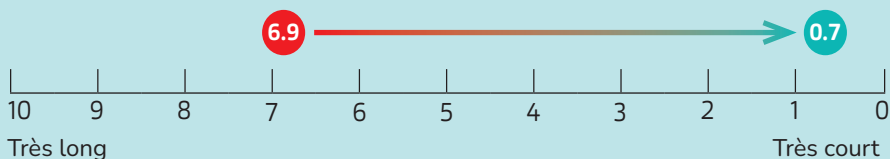


Le temps nécessaire pour soigner la plaie est nettement plus court.

Perception du corps

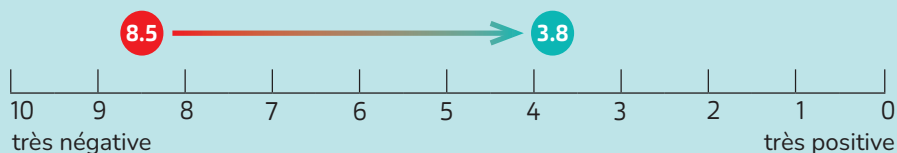

Les patientes et patients se sentent mieux dans leur corps grâce à l'utilisation d'HydraWear.

Protection antifuites et étanchéité

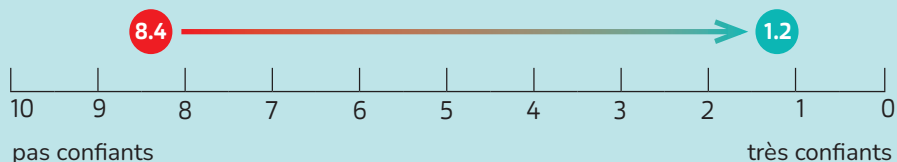

Les patientes et patients ont davantage confiance dans la capacité d'HydraWear à rester en place et à retenir l'exsudat.

● Traitement précédent (jour 0) ● Traitement avec HydraWear

Note : Les questions ont été évaluées sur une échelle visuelle analogique (EVA) de 10 points, 0 étant le meilleur score possible et 10 le plus mauvais. La qualité de vie a été mesurée à l'aide du questionnaire DLQI, jour 0 par rapport au jour 21

Système d'évaluation DLQI

0,1 = aucun impact sur la qualité de vie des patients, 2-5 = faible impact sur la qualité de vie des patients, 6-10 = impact modéré sur la qualité de vie des patients, 11-20 = impact très important sur la qualité de vie des patients, 21-30 = impact extrêmement important sur la qualité de vie des patients.



HidraWear améliore la qualité de vie des patients atteints d'acné inversée (DLQI)

L'évaluation portait sur une étude de cas sur 4 semaines.

Les plaies ont été évaluées chaque semaine. L'appréciation du personnel médical ainsi que le feedback des patients ont été enregistrés et compilés chaque semaine.

« Auparavant, la patiente ne parvenait pas à contenir l'exsudat et était confinée à la maison. Elle mène désormais une vie normale. »

« Les sous-vêtements fonctionnels sont formidables : doux et agréables à porter. Les pansements offrent beaucoup plus de confort. Ils sont plus faciles à appliquer et doivent être changés moins souvent. La patiente est satisfaite du lavage des vêtements. »


● Traitement précédent (jour 0) ● Traitement avec HidraWear

Note : Les questions ont été évaluées sur une échelle visuelle analogique (EVA) de 10 points, 0 étant le meilleur score possible et 10 le plus mauvais. La qualité de vie a été mesurée à l'aide du questionnaire DLQI, jour 0 par rapport au jour 21

Système d'évaluation DLQI

0,1 = aucun impact sur la qualité de vie des patients, 2-5 = faible impact sur la qualité de vie des patients, 6-10 = impact modéré sur la qualité de vie des patients, 11-20 = impact très important sur la qualité de vie des patients, 21-30 = impact extrêmement important sur la qualité de vie des patients.

Étude de cas 1 : Patiente de 23 ans, après une intervention chirurgicale.
Elle souffrait d'acné inversée au stade 2 et avait dû subir une intervention chirurgicale à l'aisselle.

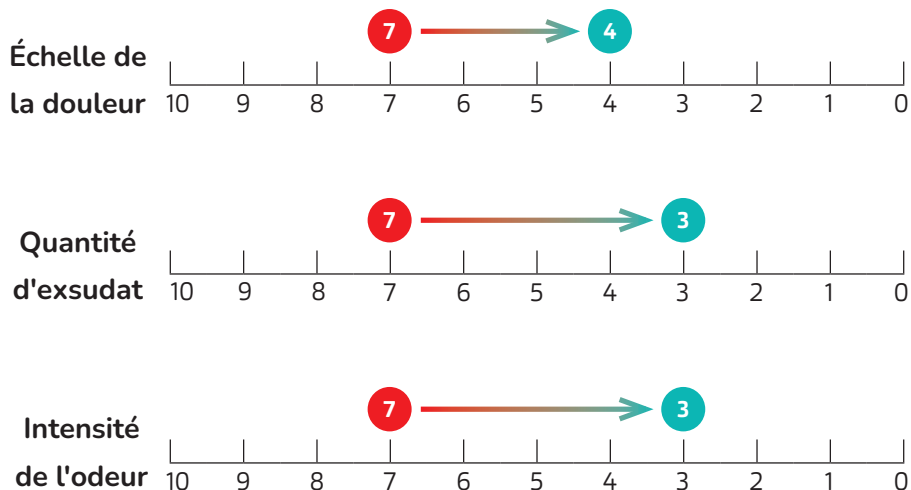

Traitement de la plaie avant

Klinipress Exsupad,
bande Hypafix®

Nouveau traitement de la plaie


Top femme HydraWear et
pansements HydraWear



Après 4 semaines avec HydraWear

- ✓ Amélioration démontrée de la prise en charge de la plaie et des exsudats
- ✓ Amélioration significative de tous les scores DLQI pour la prise en charge de la douleur et de l'exsudat
- ✓ La patiente a rapporté une plus grande facilité d'utilisation
- ✓ Amélioration de l'état de la plaie et de la peau
- ✓ Réduction des fuites et des écoulements

Étude de cas 2 : Un patient de 60 ans atteint d'acné inversée au stade 3 s'est rendu à la clinique pour des plaies non cicatrisées à l'aisselle et à l'aîne. Avant d'utiliser HydraWear, il avait été soigné pendant plus de quatre mois.

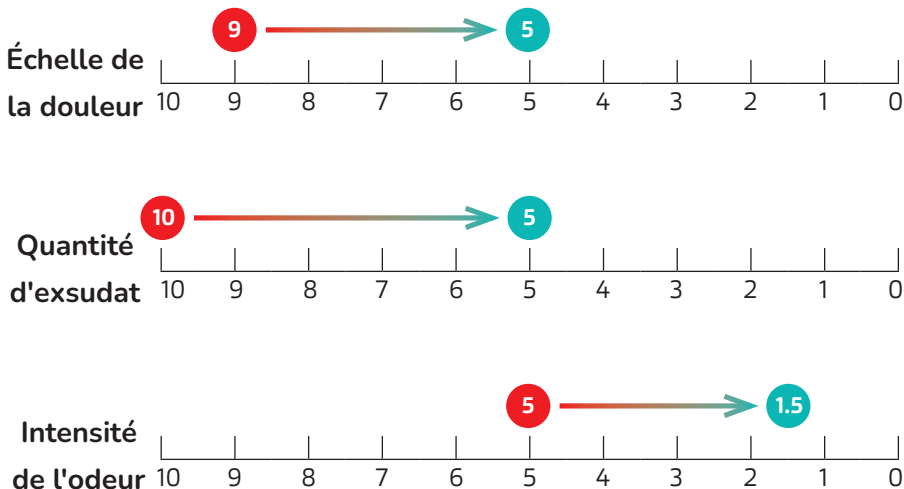

Traitement de la plaie avant

Aquacel™ AG pansement de base, Allevyn® Gentle Border for Retention

Nouveau traitement



t-shirt / shorts HydraWear
pansements HydraWear



Après 4 semaines avec HydraWear

- ✓ L'indice de qualité de vie du patient (DLQI) s'est amélioré, passant de 17 à 0
- ✓ Le patient a trouvé le système HydraWear confortable et facile à utiliser
- ✓ Le patient a pu soigner ses plaies lui-même tout en ayant des activités normales
- ✓ L'aspect et l'environnement de la plaie se sont améliorés

Étude de cas 3 : Un patient de stade 3 s'est rendu à la clinique dermatologique pour des plaies d'acné inversée non cicatrisées à l'aisselle et à l'aîne. Les soins sont décrits comme « permanents » et le patient bénéficie d'un traitement supplémentaire.

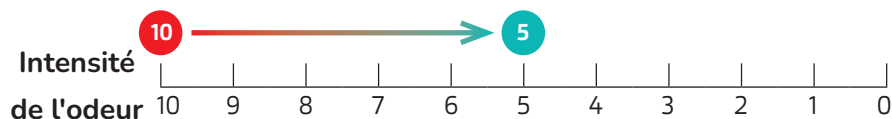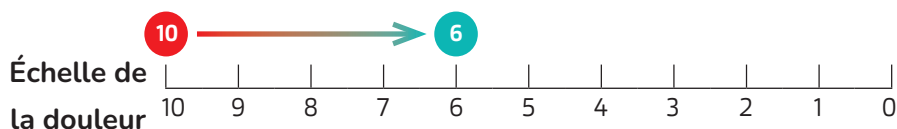

Traitement de la plaie avant

Opsite® Flexi Dressing,
Mepilex® Border Dressing,
Opsite® Tape

Nouveau traitement

t-shirt / shorts HydraWear
pansements HydraWear



Après 4 semaines avec HydraWear

- ✓ Facilité d'utilisation d'HydraWear
- ✓ Le patient a trouvé le système HydraWear confortable et n'a ressenti aucune gêne du fait de son utilisation
- ✓ Le patient a préféré HydraWear à son ancienne méthode de soin des plaies
- ✓ L'aspect et l'environnement de la plaie se sont améliorés

Ne souffrez pas inutilement des plaies difficiles à soigner

- ✓ rend les pansements adhésifs superflus
- ✓ permet aux patients de se soigner facilement eux-mêmes
- ✓ améliore les résultats cliniques



1. Moffatt C, Franks P, Hollingworth H. Medical Education Partnership Ltd; London: 2004. "Understanding wound pain and trauma: An international perspective." EWMA position document. 2–7. 2. Moloney S, McGrath BM, Roshan D, Gethin G. The Personal Impact of Daily Wound Care for Hidradenitis Suppurativa. *Dermatology*. 2022;238(4):762–771. doi: 10.159/000520262. Epub 2021 Dec 20. PMID: 34929704. 3. Chopra D, Anand N, Brito S *et al*. Wound care for patients with hidradenitis suppurativa: recommendations of an international panel of experts. *J Am Acad Dermatol* 2023; 89(6):1289–1292. <http://doi.org/10.1016/j.jaad.2023.07.1037>. 4. Moloney S, Fitzgerald D, Roshan D, Gethin G. Impact of hidradenitis suppurativa-specific wound dressing system on patient quality of life and dressing related pain. *J Wound Care* 2022; 31(11):898–906. <https://doi.org/10.12968/jowc.2022.31.11.898>.



**Pansement superabsorbant HydraWear,
avec bande de fixation**

Regular: 7,5 x 12 cm, emballage stérile

Large: 13, 5 x 19, emballage stérile



**Pansement en mousse HydraWear,
avec bande de fixation**

Regular: 10 x 15 cm, emballage stérile



Top pour femme AX HydraWear

Sous-vêtement fonctionnel respirant

Top pour femme, noir, lavable en machine jusqu'à 100x



T-shirt unisexe HydraWear AX

Sous-vêtement fonctionnel respirant

Unisex T-Shirt, gris chiné, lavable en machine jusqu'à 100x



Short pour femme HydraWear BB

Sous-vêtement fonctionnel respirant

Short pour femme, noir, lavable en machine jusqu'à 100x



Short pour homme HydraWear BB

Sous-vêtement fonctionnel respirant

Short pour homme, gris chiné, lavable en machine jusqu'à 100x

Le système de soin des plaies sans adhésif HidraWear est disponible chez :



Mediq Suisse homecare

Rosengartenstrasse 25 | 8608 Bubikon

No de tél. gratuit : 0800 810 808

homecare@mediq-suisse.ch | www.mediqsuisse.ch

