

Dansac TRE™ Technologie

erhältlich ...

... für die einteilige Ileo-, Kolo- und Urostomieversorgung in Plan, Konvex und Soft Konvex. Neu hinzugekommen sind die High Output Stomabeutel sowie schwarze Beutel für die Ileo- und Kolostomieversorgung.



... für die zweiteilige Stomaversorgung als Hautschutzplatten in Plan, Konvex und Soft Konvex, die mit allen NovaLife™ 2 Beuteln von Dansac kombiniert werden können.




... zum Ausgleich von Unebenheiten als modellierbare Hautschutzringe, die mit allen auf dem deutschen Markt verfügbaren Beutelsystemen verwendet werden können.



Dansac GmbH
Riesstraße 25
80992 München
www.dansac.de

**Kontaktdaten für AnwenderInnen
und Angehörige**
Telefon: 0800 8883388 (gebührenfrei)
Mo.–Do.: 8:00 Uhr–17:00 Uhr
Fr.: 8:00 Uhr–14:00 Uhr
E-Mail: beratungsteam@dansac.com

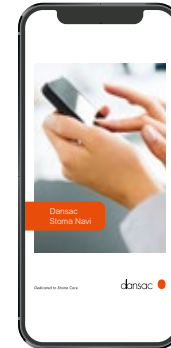

Dansac Stoma Navi – die tägliche Begleitung in der Stomaversorgung

Die App hilft Pflegekräften in der Beratung und liefert wichtige Informationen für die PatientInnen.



Wohlfühlen in der eigenen Haut

Erfahren Sie mehr unter www.dansac.de

Die Informationen in dieser Broschüre sind nicht als medizinische Beratung gedacht und sollen die Empfehlungen Ihres Arztes, Ihrer Ärztin oder anderer medizinischer Fachkräfte nicht ersetzen. Diese Broschüre sollte auch nicht dazu verwendet werden, in einem medizinischen Notfall Hilfe zu suchen. In einem medizinischen Notfall sollten Sie sich sofort persönlich in ärztliche Behandlung begeben. Da sich Bestimmungen ab und zu ändern, besuchen Sie bitte unsere Internetseite für die aktuellsten Informationen.


Lesen Sie vor der Verwendung unserer Produkte stets die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.

Dansac, das Dansac Logo, NovaLife und TRE sind Markenzeichen der Dansac A/S. © 2025 Dansac A/S



dansac

P02-44-400_06.25

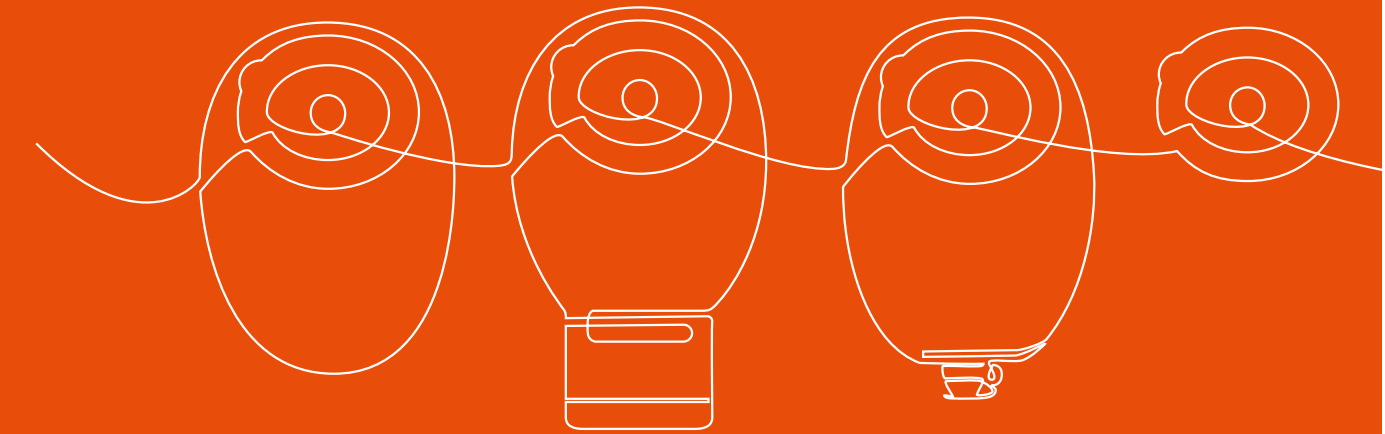

NovaLife TRE™ Hautschutz


Praktische Hinweise für AnwenderInnen

dansac


Und so funktioniert der TRE™ Hautschutz



- Um zu verstehen, wie gesunde Haut auch gesund bleibt, ist es wichtig, sich mit dem pH-Wert der Haut und ihrem Säureschutzmantel zu beschäftigen.
- pH ist das Maß, das bezeichnet wie sauer oder alkalisch etwas ist. Die Hautoberfläche ist von Natur aus sauer und hat einen pH-Wert von 4–6, der sogenannte Säureschutzmantel. Er bietet der Haut ein Schutzniveau und antimikrobielle Eigenschaften, um sie gesund zu erhalten.
 - Manche Einflüsse können den Säureschutzmantel der Haut schwächen, wie etwa Schweiß oder Stomaausscheidung. Die pH-Puffertechnologie des NovaLife TRE™ Hautschutzes schafft ein Umfeld, das freundlich zur Haut, jedoch unfreundlich zu Verdauungsenzymen ist.

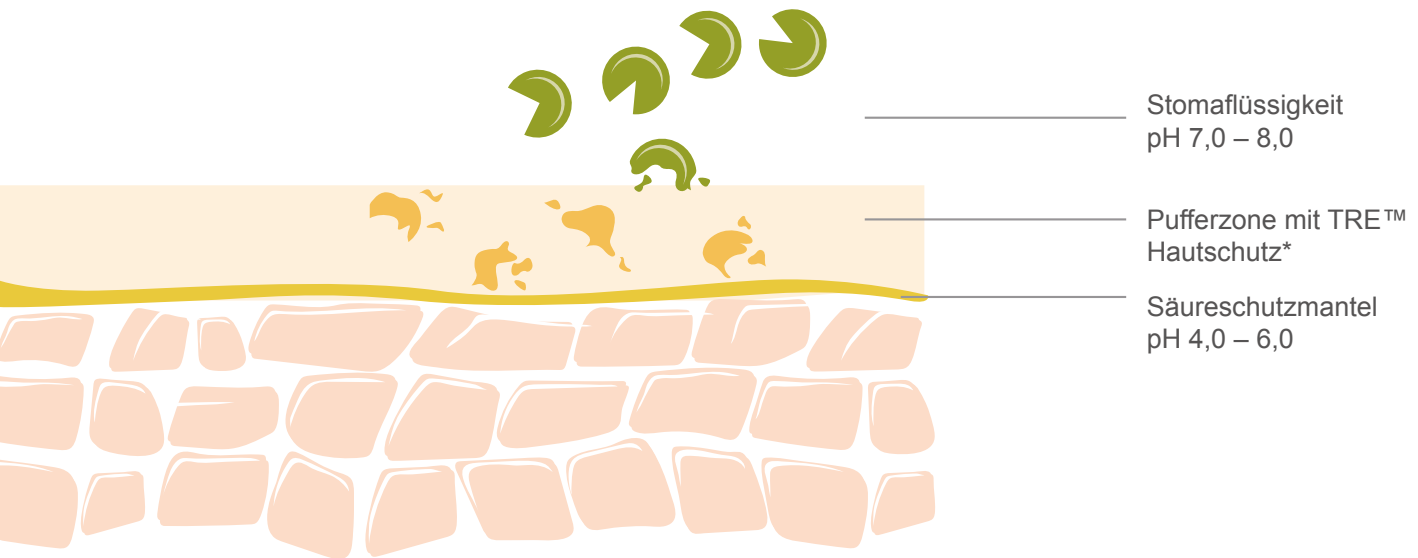

*Entwickelt, um die hautschädigenden Auswirkungen von Verdauungsenzymen auszugleichen.

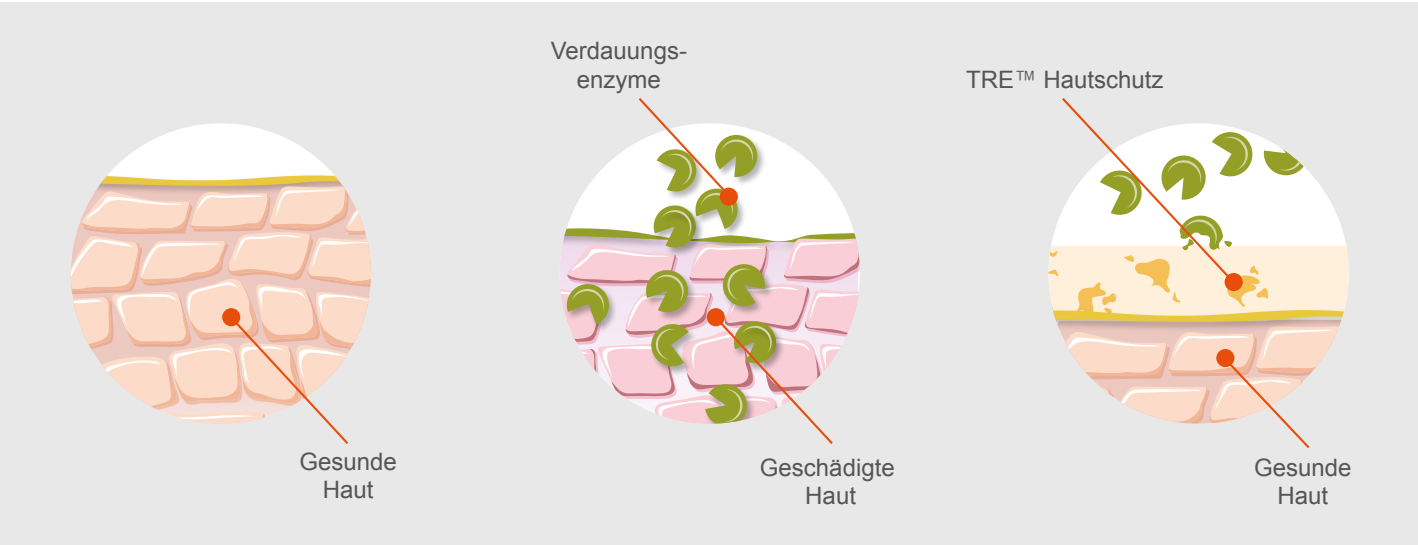

Beim Anbringen der Versorgung



- Die Sicherheit Ihrer Stomaversorgung ist ein Thema, worüber Sie sich möglicherweise Gedanken machen. Der NovaLife TRE™ Hautschutz ist konzipiert, um eine sichere Haftung auf der Haut zu unterstützen.
- Ihnen wird die weiße Farbe des NovaLife TRE™ Hautschutzes auffallen. Ebenso werden Sie bemerken, dass der Hautschutz dünner ist im Vergleich zu unseren ursprünglichen NovaLife™ Basisplatten.
 - Der NovaLife TRE™ Hautschutz besitzt eine hohe Haftkraft. Er ist konzipiert für Flexibilität, die natürliche Körperbewegungen ermöglicht. Dabei unterstützt er Sie bei Alltagstätigkeiten, die Ihnen Freude bereiten.




- Der TRE™ Hautschutz wurde zur Aufnahme von Stomaausscheidung und Schweiß entwickelt.
- Ihr Stoma hat eine feuchte Oberfläche und Ihre Haut sondert durch die Schweißdrüsen Schweiß ab.
 - Im Tagesverlauf bemerken Sie eventuell, dass die weiße Farbe des Hautschutzes heller wird. Hier zeigt sich, dass Ihr Hautschutz die Feuchtigkeit aufnimmt, ohne dabei an Formstabilität und Haftfähigkeit zu verlieren.
 - Der Hautschutz quillt in Bereichen mit hoher Feuchtigkeit auf. Dies kann direkt um das Stoma herum sofort erkennbar sein.

Mithilfe des NovaLife TRE™ Hautschutzes können Sie sich in Ihrer Haut wohlfühlen!



Computeranimation

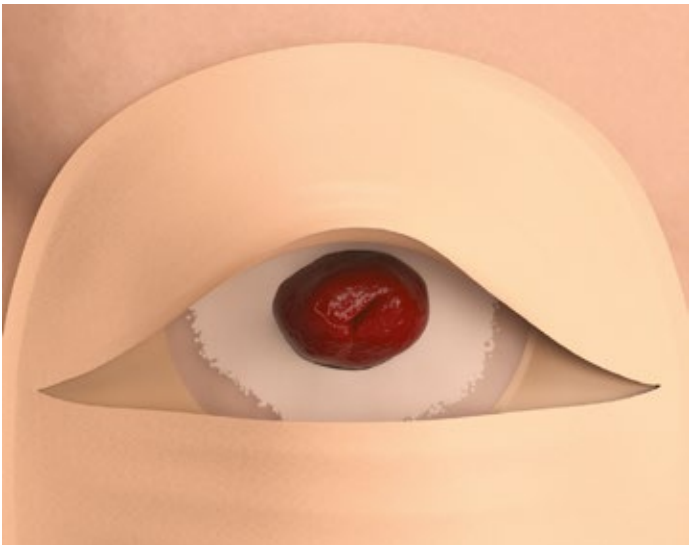


Computeranimation

Nach der Anwendung

Sie werden feststellen, dass der Hautschutz seine Form behält und dennoch einfach zu entfernen ist, wenn es an der Zeit ist, Ihre Versorgung zu wechseln.


- Beim Entfernen des Hautschutzes werden Sie die Farbänderung erkennen, die Bereiche mit hoher Feuchtigkeit sichtbar macht. Dies kann weiß gesprenkelt aussehen.
- Nach dem Reinigen und Trocknen Ihres Stomas werden Sie auf der stomaumgebenden Haut wahrnehmen, wie der Hautschutz zur sicheren Haftung beigetragen hat.

Machen Sie sich weniger Gedanken über Hautprobleme dank der Unterstützung des NovaLife TRE™ Hautschutzes. Am besten ist natürlich gesunde Haut.

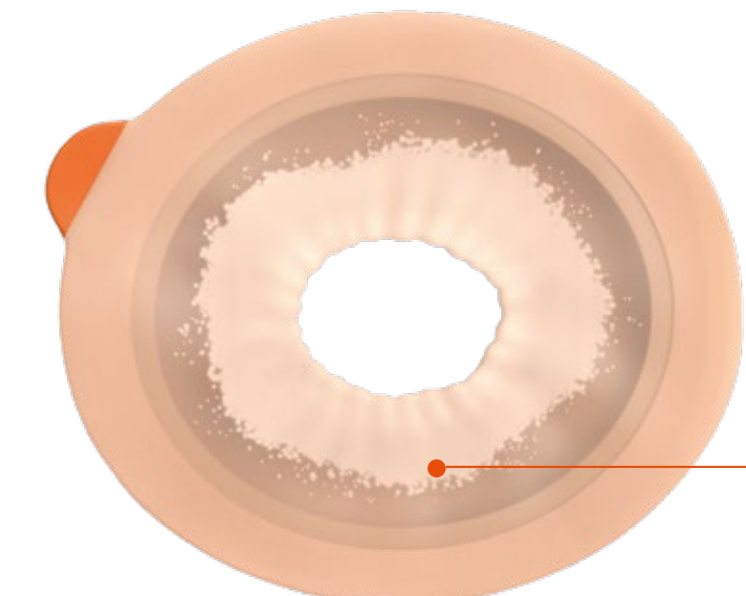

Computeranimation

Beim Entfernen der Versorgung sehen Sie, wie sich der flexible TRE™ Hautschutz den Körperkonturen der stomaumgebenden Haut angepasst und natürliche Körperbewegungen zugelassen hat.

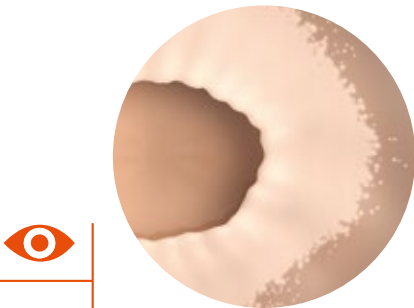

Die Farbänderung hin zu einem helleren Weiß zeigt, dass der TRE™ Hautschutz Feuchtigkeit aufnimmt.