Dansac TRE™ Technologie

erhältlich...



...für die einteilige Ileo-, Kolo- und Urostomieversorgung in plan, konvex und soft konvex.

> ... für die zweiteilige Stomaversorgung als Basisplatten in plan, soft konvex und konvex, die mit allen NovaLife™ 2 Beuteln von Dansac kombiniert werden können.



... zum Ausgleich von Unebenheiten als modellierbare Hautschutzringe, die mit allen auf dem deutschen Markt verfügbaren Beutelsystemen verwendet werden können.

Dansac GmbH

Riesstraße 25 80992 München www.dansac.de

Kontaktdaten für AnwenderInnen und Angehörige

Telefon: 0800/888 33 88 (gebührenfrei)

Mo.-Do.: 8:00 Uhr-17:00 Uhr Fr.: 8:00 Uhr-14:00 Uhr

E-Mail: beratungsteam@dansac.com



Dansac Stoma Navi – die tägliche Begleitung in der Stomaversorgung

Die App hilft Pflegekräften in der Beratung und liefert wichtige Informationen für die PatientInnen.





Wohlfühlen in der eigenen Haut

Erfahren Sie mehr unter www.dansac.de

Alle genannten Testimonials in dieser Broschüre erhielten von Dansac eine entsprechende Vergütung

Die dargestellten Erfahrungsberichte, Aussagen und Meinungen gelten für die abgebildeten Personen. Diese Aussagen sind repräsentativ für ihre Erfahrungen, aber die genauen Ergebnisse und Erfahrungen sind einzigartig und individuell für jede Person.

Die Informationen in dieser Broschüre sind nicht als medizinische Beratung gedacht und sollen die Empfehlungen Ihres eigenen Arztes oder anderer medizinischer Fachkräfte nicht ersetzen. Diese Broschüre sollte auch nicht dazu verwendet werden, in einem medizinischen Notfall Hilfe zu suchen. In einem medizinischen Notfall sollten Sie sich sofort persönlich in ärztliche Behandlung begeben. Da sich Bestimmungen ab und zu ändern, besuchen Sie bitte unsere Internetseite für die aktuellsten Informationen.

Lesen Sie vor der Verwendung unserer Produkte stets die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.

Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihre medizinische Fachkraft für weitere

Dansac, das Dansac Logo, NovaLife und TRE sind Markenzeichen der Dansac A/S. © 2023 Dansac A/S
















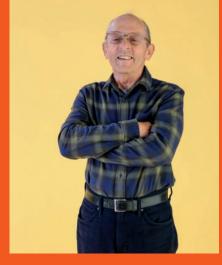



NovaLife TRE™ Hautschutz

Praktische Hinweise für AnwenderInnen






Und so funktioniert der TRE™ Hautschutz




pH-Balance

Um zu verstehen, wie gesunde Haut auch gesund bleibt, ist es wichtig, sich mit dem pH-Wert der Haut und ihrem Säureschutzmantel zu beschäftigen.

- pH ist das Maß, das bezeichnet wie sauer oder alkalisch etwas ist. Die Hautoberfläche ist von Natur aus sauer und hat einen pH-Wert von 4–6, der sogenannte Säureschutzmantel. Er bietet der Haut ein Schutzniveau und antimikrobielle Eigenschaften, um sie gesund zu erhalten.
- Manche Einflüsse können den Säureschutzmantel der Haut schwächen, wie etwa Schweiß oder Stomaausscheidung.
 Die pH-Puffertechnologie des NovaLife TRE™ Hautschutzes schafft ein Umfeld, das freundlich zur Haut, jedoch unfreundlich zu Verdauungsenzymen ist.

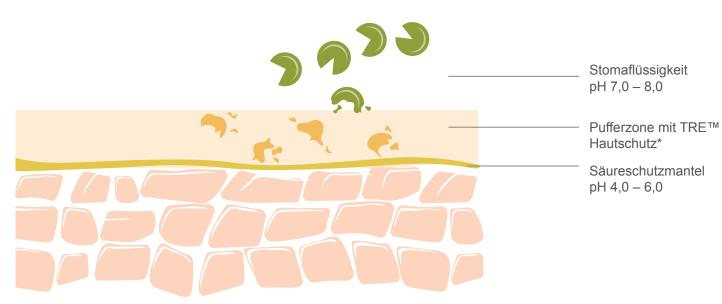

*Entwickelt, um die hautschädigenden Auswirkungen von Verdauungsenzymen auszugleichen.

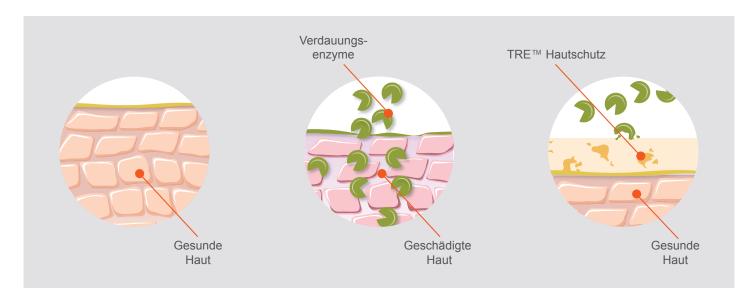

Beim Anbringen der Versorgung



Adhäsio

Die Sicherheit Ihrer Stomaversorgung ist ein Thema, worüber Sie sich möglicherweise Gedanken machen. Der NovaLife TRE™ Hautschutz ist konzipiert, um eine sichere Haftung auf der Haut zu unterstützen.

- Ihnen wird die weiße Farbe des NovaLife TRE™
 Hautschutzes auffallen. Ebenso werden Sie
 bemerken, dass der Hautschutz dünner ist im
 Vergleich zu unseren ursprünglichen NovaLife™
 Basisplatten.
- Der NovaLife TRE™ Hautschutz besitzt eine hohe Haftkraft. Er ist konzipiert für Flexibilität, die natürliche Körperbewegungen ermöglicht. Dabei unterstützt er Sie bei Alltagstätigkeiten, die Ihnen Freude bereiten.

Absorption

Der TRE™ Hautschutz wurde zur Aufnahme von Stomaausscheidung und Schweiß entwickelt.

- Ihr Stoma hat eine feuchte Oberfläche und Ihre Haut sondert durch die Schweißdrüsen Schweiß ab.
- Im Tagesverlauf bemerken Sie eventuell, dass die weiße Farbe des Hautschutzes heller wird. Hier zeigt sich, dass Ihr Hautschutz die Feuchtigkeit aufnimmt, ohne dabei an Formstabilität und Haftfähigkeit zu verlieren.
- Der Hautschutz quillt in Bereichen mit hoher Feuchtigkeit auf. Dies kann direkt um das Stoma herum sofort erkennbar sein.

Sie werden feststellen, dass der Hautschutz seine Form behält und dennoch einfach zu entfernen ist, wenn es an der Zeit ist, Ihre Versorgung zu wechseln.

 Beim Entfernen des Hautschutzes werden Sie die Farbänderung erkennen, die Bereiche mit hoher Feuchtigkeit sichtbar macht. Dies kann weiß gesprenkelt aussehen.

Nach der Anwendung

 Nach dem Reinigen und Trocknen Ihres Stomas werden Sie auf der stomaumgebenden Haut wahrnehmen, wie der Hautschutz zur sicheren Haftung beigetragen hat.


Machen Sie sich weniger Gedanken über Hautprobleme dank der Unterstützung des NovaLife TRE™ Hautschutzes.

Am besten ist natürlich gesunde Haut.





Beim Entfernen der Versorgung sehen Sie, wie sich der flexible TRE™ Hautschutz den Körperkonturen der stomaumgebenden Haut angepasst und natürliche Körperbewegungen zugelassen hat.

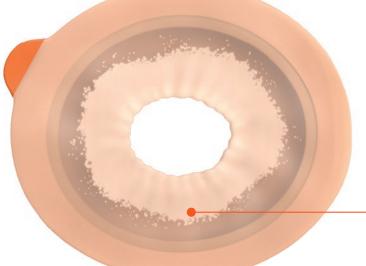


Computeranimation




Die Farbänderung hin zu einem helleren Weiß zeigt, dass der Hautschutz Feuchtigkeit aufnimmt.

Mithilfe des NovaLife TRE™ Hautschutzes können Sie sich in Ihrer Haut wohlfühlen!

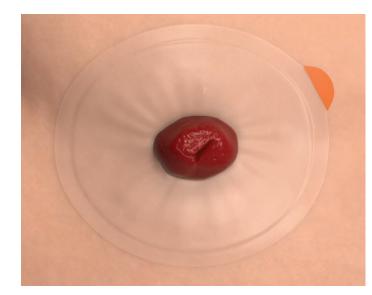

Computeranimation

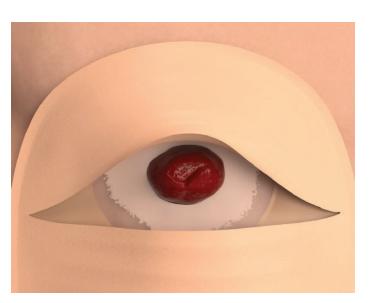

Computeranimation