



kliniderm® Superabsorber



KLINION®

kliniderm® Superabsorber

Worum handelt es sich?

kliniderm® Superabsorber sind **vierlagige, supersaugfähige Verbände**. Sie sind **für mäßig bis stark nässende, chronische und akute Wunden** geeignet. Sie zeichnen sich durch hohes Saug- und Speichervermögen aus. kliniderm superabsorbierende Verbände sind mit Blick auf das Aufnahmevermögen des Exsudats und Komfort für den Patienten mit marktführenden Marken vergleichbar. Und das zum attraktiven Preis.

Der Superabsorber hat auch unter Kompression eine starke Saugkraft und ist einfach anzuwenden.

Wie funktioniert es?

Die vierlagigen kliniderm Superabsorber werden durch eine hypoallergene, patentierte Abdichtung zusammengehalten. Durch die, mit der Wunde nicht verklebende Kontaktschicht und die sich anschließende Verteilerschicht, wird Nässe in den Kern aus Polymerteilchen geleitet, die diese aufnimmt und zuverlässig speichert. Das Deckvlies ist flüssigkeitsabweisend, aber atmungsaktiv. So schützt es Kleidung und Bettbezug vor Durchnässen und begünstigt gleichzeitig die Feuchtigkeitsregulation. Ein Teil der Nässe wird über das Vlies in Form von Wasserdampf nach außen abgegeben.

✓ **Wirksam unter Kompression**

Ideal für offene Beine

✓ **Leicht, flexibel und anschießsam**

Ermöglicht eine einfache Anwendung, ohne sperrig zu sein, was den Komfort für Patienten erhöht

✓ **Große Auswahl an Größen**

Die richtige Größe passend zur Wunde

✓ **Hervorragende Saug- und Rückhalteigenschaften**

Verringern das Mazerationsrisiko und schützen das Gewebe in der Wundumgebung

✓ **Hypoallergen**

Keine Klebstoffe für mehr Patientenkomfort

✓ **Sanfte Wundkontaktschicht**

Verklebt nicht mit dem Wundbett

✓ **Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis**

Hochwertige Wundauflagen zu erschwinglichen Preisen

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

kliniderm® superabsorbierende Verbände können **unter Kompression verwendet werden** und sind **für mäßig bis stark nässende, chronische und akute Wunden** geeignet.

Ein ineffektives Exsudat-Management kann zahlreiche Folgen nach sich ziehen: Neben dem Auslaufen, der Verschmutzung und Mazeration in der Wundumgebung kann sich die Heilung verzögern und Geruch entstehen. Weitere Beschwerden, Schmerzen, Infektionen und die Notwendigkeit häufiger Verbandwechsel sind ebenso möglich, wie psychosoziale Probleme, die in sozialer Isolation münden können. kliniderm® Superabsorber beugen vor und haben sich mittels hypoallergener, patentierter Abdichtung bewährt.

	gering	mäßig	hoch	sehr hoch	
Beschreibung	Beim Entfernen des Verbandes sind geringe Mengen Flüssigkeit sichtbar Keine Mazeration in der Wundumgebung	Der Verband kann stark durchnässt sein Mögliche Mazeration/Exkoration in der Wundumgebung	Sehr viel Flüssigkeit ist sichtbar Der Primärverband ist nass und der Sekundärverband kann durchnässt sein Mazeration/Exkoration in der Wundumgebung		
Behandlungsziele	Eine feuchte Wundheilung Die Haut in der Wundumgebung ist gepflegt	Eine feuchte Wundheilung Die Haut in der Wundumgebung ist gepflegt	Reduzierung und Regulierung des Feuchtigkeitsgehalts Die Haut in der Wundumgebung ist gepflegt		
Auflagenauswahl	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block;"> kliniderm superabsorbent dressing </div>				

Aufbau

kliniderm® superabsorbierende Verbände überzeugen durch ihren komplexen Aufbau.


Superabsorbierender Innenkern
 superabsorbierende Polymere schließen Exsudat und Bakterien ein und halten diese von der Wunde¹ fern

Flüssigkeitsabweisende Trägerschicht
 minimiert das Risiko des Durchnässens, erhöht die Tragezeit und den Patientenkomfort

Zwischenschicht
 verteilt das Exsudat gleichmäßig in der absorbierenden Schicht

Hydrophile Wundkontaktschicht
 sanfte Kontaktschicht schützt das Wundbett und ermöglicht den Exsudattransfer

Erweiterungsraum
 ermöglicht die Ausdehnung des absorbierenden Kerns innerhalb des Außenverbandes, um das Exsudat zu regulieren

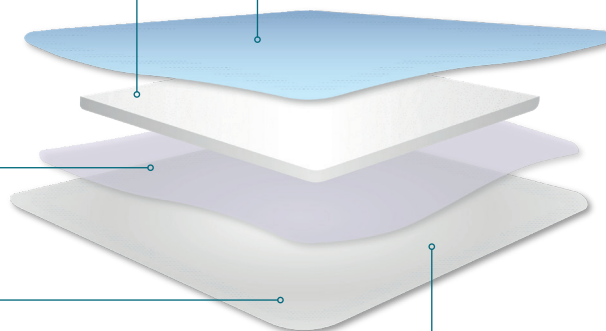

Bestellinformationen

Bestellen Sie **verschiedene Größen kliniderm® Superabsorber** für mehr Pflegekomfort und die schnelle Wundheilung Ihrer Patienten.

Bestellen Sie einfach online über unser
Mediq Business Portal per business.mediq.de/de oder per
Telefon 06861 900 76 80
Fax 06861 900 70 18



Produktname	Größe	Stück pro Packung	Packungen pro Karton	PZN	Artikelnummer
kliniderm® Superabsorber	10 x 10 cm	10 x 1	5	12552710	40511706
	10 x 15 cm	10 x 1	4	12552727	40511707
	10 x 20 cm	10 x 1	24	15299418	40511713
	20 x 20 cm	15 x 1	8	13154377	40511703
	20 x 30 cm	10 x 1	8	13154360	40511704



Sie wünschen ein Produktmuster?

Bestellen Sie jetzt ein **kliniderm® Superabsorber Produktmuster** und überzeugen Sie sich von der Qualität.

Ihre Vorteile

kliniderm® superabsorbierende Verbände erfüllen hohe Ansprüche an die Pflegequalität, unterstützen die Wundheilung und schonen Ihr Budget. **Klinische Studien** haben gezeigt:

99,99% Anwenderzufriedenheit²

64% Reduzierung der Kosten für Verbandmaterial²

Hohe klinische Leistung²

Reduzierte Pflegekosten von selteneren Verbandwechseln²

26% Reduzierung des Verbandverbrauchs²

Kontakt

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns unter:

Telefon 06861 900 76 80

Fax 06861 900 70 18

References:

1. Free swell absorption, 2015. Data on file. 2. Barrett, S. Cost-effective management of wound exudate. Wounds Essentials, 2015, 10(1)



Mediq Deutschland GmbH
In der Bruchwies 10 | 66663 Merzig
Telefon 0800 334 48 00
Fax 0800 334 48 01
business@mediq.com
www.mediq.de



Hersteller
Medeco B.V.
Brandpuntlaan
Zuid 14
2665 NZ Bleiswijk
The Netherlands

