



kliniderm® Silikon- schaumverband Multisite



KLINION®

kliniderm®[®] Silikon- schaumverband Multisite

Worum handelt es sich?

kliniderm® Silikonschaumverband Multisite ist eine **absorbierende, atraumatische Wundauflage** aus Polyurethanschaum mit einer Silikonbeschichtung. Es handelt sich dabei um eine sterile, selbsthaftende Wundauflage, die aufgrund ihrer Silikonbeschichtung nicht mit der Wunde verklebt und einen atraumatischen Verbandwechsel gewährleistet. kliniderm® Silikonschaumverband kann an Körperstellen verwendet werden, an denen eine besondere Passform erforderlich ist. Dank des speziellen Designs bleibt der Komfort auch dann erhalten, wenn sich die Körperkonturen stark verändern, wie im Bereich von Gelenken oder Schultern, den Ellenbogen, Händen, Knien und Füßen, dem Becken und der Brust.

Wie funktioniert es?

Die haftende Silikonschicht passt sich sanft der Hautoberfläche an. Absorbierender Schaum nimmt Flüssigkeit in den Verband auf und verhindert, dass das Wundbett austrocknet und die umliegende Haut aufweicht. Superabsorbierende Fasern schließen Exsudat im Verband ein. Die wasserdampfdurchlässige Polyurethanfolie wirkt als Barriere für Flüssigkeit und Mikroorganismen.

- ✓ **Besondere Passform**
Die Einschnitte sorgen für zusätzliche Anpassung an stark bewegten Körperkonturen
- ✓ **Nimmt Exsudat auf, leitet es nach außen**
und schützt so die umgebende Haut und unterstützt die feuchte Wundheilung
- ✓ **Hautfreundlich**
Zuverlässiger Halt und sicher in der Anwendung auf empfindlicher Haut
- ✓ **Wirksam unter Kompression**
Gute Absorption unter Kompressionsverbänden und -strümpfen
- ✓ **Einzigartiges Design**
Große Flügel sorgen für optimalen Tragekomfort und verhindern ein Ablösen des Verbandes
- ✓ **Weiche Silikonwundkontaktschicht**
reduziert Schmerzen beim Verbandwechsel
- ✓ **Kann bis zu 7 Tage getragen werden**
Verringert die Anzahl der erforderlichen Verbandswechsel
- ✓ **Schutz**
Bietet eine Barriere gegen Mikroorganismen

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

kliniderm® Silikonierter Schaumverband Multisite eignet sich für chronische und akute Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation und kann während des Heilungsprozesses bei diesen Wunden eingesetzt werden: Druckgeschwüre, venöse Beingeschwüre, diabetische Fußgeschwüre, Schnitt- und Schürfwunden, Hautrisse, Spenderstellen, postoperative Wunden, Verbrennungen ersten und zweiten Grades. Der Schaumverband ist als alleiniger Primärverband einsetzbar. Er kann aber auch in Kombination mit einer Kompressionstherapie angewandt werden und je nach Indikation bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.

kliniderm® Silikonschaumverbände sind sanft und angenehm zu tragen. Sie versprechen einen überaus hohen Anwendungskomfort.

Bestellinformationen

Bestellen Sie **kliniderm® Silikonschaumverband Multisite** für mehr Pflegekomfort und die schnelle Wundheilung Ihrer Patienten.

Bestellen Sie einfach online über unser **Mediq Business Portal** per business.mediq.de/de oder per
Telefon **06861 900 76 80**
Fax **06861 900 70 18**



Produktname	Größe	Stück pro Packung	Packungen pro Karton	PZN	Artikelnummer
kliniderm® Silikonschaumverband Multisite	20 x 20 cm	5 x 1	20	19125715	40514822



Sie wünschen ein Produktmuster?

Bestellen Sie jetzt ein **kliniderm® Silikonschaumverband Multisite Produktmuster** und überzeugen Sie sich von der Qualität.

Kontakt

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns unter:

Telefon **06861 900 76 80**

Fax **06861 900 70 18**





Mediq Deutschland GmbH

In der Bruchwies 10 | 66663 Merzig

Telefon 0800 334 48 00

Fax 0800 334 48 01

business@mediq.com

www.mediq.de



Hersteller

Medeco B.V.

Brandpuntlaan

Zuid 14

2665 NZ Bleiswijk

The Netherlands

